

NASENSAUGER FÜR BABIES

nasal aspirator for infants
aspirateur nasal pour bébés
rinoaspiratore per neonati

GEBRAUCHSANWEISUNG NASENSAUGER

1. Den Pumpball zusammendrücken und die Düse behutsam in das verstopfte Nasenloch des Babies halten.
2. Das andere Nasenloch wird dabei mit einem Finger zugehalten.
3. Den Druck am Pumpball langsam lockern. Dadurch wird durch leichten Unterdruck der Schleim auf sanfter Art abgesaugt und Ihr Baby kann wieder frei durchatmen.
4. Nach Gebrauch die Düse abnehmen und gründlich unter fließendwarmen Wasser reinigen.

WICHTIG!

Nicht in der Mikrowelle desinfizieren. Explosionsgefahr!
Keine Dampfdesinfektion!

**Informieren Sie sich bei Ihrem Apotheker
über die neue erweiterte Collection von
Baby-Frank oder fordern Sie unseren
Baby-Katalog an.**



GARANTIE FÜR QUALITÄT!

® Büttner-Frank GmbH • Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen

Tel. 09131 / 7905-0 • Fax 09131 / 60 27 69

e-mail: kundenservice@buettnner-frank.de